

Protocol voor AI test op sectie materiaal.

Monstername

Een sectie bevat maximaal 5 kippen (een gemiddelde sectie omvat 3 tot 5 dieren). Van elk dier moet zowel een keel/tracheaswab als een cloacaswab worden ingezonden. Op het buisje moet worden aangegeven of het keel/tracheaswab is of een cloacaswab betreft, inclusief een diernummer, zodat later duidelijk is welke cloacaswab bij welke keel/tracheaswab hoort. Uiteindelijk wordt er 1 uitslag per dier teruggekoppeld.

Voor de monstername dienen speciale swabs te worden gebruikt met staafjes van plastic of metaal. De GD biedt de te gebruiken swabs (Virocult) per stuk te koop aan. Artikel nummer VDDIS061. Ze zijn te bestellen bij de afdeling verkoop 0900-1770, of via de webwinkel (www.gddeventer.com).

Verpakkingsinstructie diagnostische monsters.

De monsters moeten bij voorkeur gekoeld getransporteerd worden! Daarnaast gelden voor het vervoer van diagnostische monsters wettelijk vastgestelde verpakkingseisen (P650), waaraan bij vervoer over de weg in alle gevallen dient te worden voldaan (dus ook tijdens het vervoer in de eigen auto). Vervoerder én opdrachtgever zijn daarvoor in dezelfde mate verantwoordelijk én aansprakelijk. De inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) is belast met het toezicht op de correcte uitvoering. Verpakkingsinstructie P650 geeft aan dat diagnostische monsters bij vervoer over de weg verpakt moeten zijn:

- in lekvrije primaire houders (in het geval van de swabs: plastic zakjes, in geval van vloeistof omgeven door voldoende absorberend materiaal om bij breuk de inhoud van de primaire houder in zijn geheel te kunnen absorberen
- Daaromheen een eveneens lekvrije/stofdichte (*secundaire*) houder (*of safety bag*) die voldoet aan wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen (conform P650).
- Vervolgens een (*tertiaire*) *buitenverpakking* voorzien van voldoende opvulmateriaal om de secundaire houder(s) te fixeren en op de buitenzijde voorzien van de tekst "*Diagnostische monsters*", (een sticker met) de aanduiding "*UN3373*" en naam en adres van zowel adressant als afzender.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Vervoersinformatiecentrum van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, tel. 070-305 24 44; email vervoerinfo@ivw.nl of internetsite www.ivw.nl.

Bij GD zijn de volgende verpakkingsmaterialen uit voorraad leverbaar:

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs (excl. BTW)
VDTRA106	Verzenddoos voor 36 bloedbuizen (max. 10 mL)	€ 20,00/10 stuks
VDTRA117	TPG-Post toegelaten/TNO-geteste enveloppe diagnostisch materiaal (formaat A5)*	€ 11,75/50 stuks
VDTRA118	Vloeistof/lekdicte zak voor diagnostisch materiaal conform P650 (formaat A5)	€ 16,75/50stuks
VDTRA119	Absorptie materiaal voor 3 (bloed-)buizen	€ 16,75/50stuks
VDTRA120	TPG-Post toegelaten/TNO geteste enveloppe diagnostisch materiaal (formaat A4)*	€ 18,50/50 stuks
VDTRA121	Vloeistof/lekdicte zak voor diagnostische monsters conform P650(formaat A4)	€ 20,00/50 stuks
VDTRA122	Absorptie materiaal voor 5 (bloed-)buizen	€ 20,00/50 stuks
VDTRA123	Absorptievel 14 x 12 cm (geschikt voor 42 mL vloeistof)	€ 0,15/stuk
VDTRA126	Vloeistof/lekdicte zak voor diagnostische monsters conform P650(485 x 460 mm + handvat)	€ 0,70/stuk
VDTRA127	Absorptievel 23 x 24 (geschikt voor 166 mL vloeistof)	€ 12,25/50 stuks
VDTRA128	Doos golfkarton 280x280x150 (o.a. geschikt als buitenverpakking voor 2 verzenddozen VDTRA 106)	€ 0,55/stuk
VDETI121	Etiket UN3373 Diagnostic Specimens	€ 0,05/stuk
Te bestellen bij GD afdeling Verkoop 0900-1770		

* Voor het verzenden van diagnostische monsters via TPG-Post moet gebruik worden gemaakt van "door TPG-Post toegelaten" verzendmateriaal.



Monsters dienen begeleid te worden met een (elektronisch) monsterbegeleidingformulier welke via internet bij CIDC te downloaden zijn. http://www.cidc-lelystad.wur.nl/NR/rdonlyres/A21D7868-8AAA-44F7-B1BD-74B7BBC40E68/35852/L_Form_vogel1.pdf

Naast de algemene gegevens op het formulier tevens vermelden:

- *Reden onderzoek: screening*
- *Type onderzoeksobject: swabs*
- *Gewenst onderzoek (niet serologisch); A103-01 Influenza PCR*

Het formulier moet aan de buitenkant van de verpakking worden bevestigd.

Transport

Monsters, incl. het monsterbegeleidingsformulier dienen te worden opgestuurd naar:

- CIDC, Houtribweg 39, 8221 RA Lelystad.

Monsters worden bij voorkeur tussen 7 en 19 uur bezorgd. Buiten werktijden kunnen monsters worden afgeleverd na melding van de verwachte aankomsttijd via het telefoonnummer 0320-238800 of via de semavoic service nummer 06 650 72134.

De kosten van het transport zijn voor eigen rekening, tenzij men gebruik maakt van GD DAP Afhaalservice. Dit vervoer van monsters wordt vergoed vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF), en brengt daarmee geen kosten met zich mee voor de DAPs/pluimveehouders. Indien een dierenarts het transport van de monsters naar het CIDC zelf wil verzorgen dan kan dit, echter dan worden de kosten van het transport niet vergoed. Vanzelfsprekend dienen bij dit vervoer dezelfde voorwaarden en procedures gevolgd te worden als bij vervoer verzorgd door de GD.

Om gebruik te maken van de GD DAP Afhaalservice dient u zich altijd aan te melden bij GD, ook als u al gebruiker bent van deze service. Er moeten namelijk nieuwe barcode stickers (in het kader van de adressering aan CIDC) worden verstrekt. Reken hiervoor op 2 werkdagen doorlooptijd.

Indien u nog geen gebruiker bent van de GD DAP Afhaalservice, moet er nog een speciale afsluitbare kast bij de dierenartsenpraktijk worden geplaatst. GD regelt dit voor u. U dient rekening te houden met een doorlooptijd van 10 werkdagen.

Aanmelden voor GD DAP Afhaalservice voor monsters naar CIDC, gaat via het centrale nummer van GD, 0900-1770.

Indien er monsters moeten worden afgehaald dient u dit telefonisch door te geven voor 18.00. Het betreffende telefoonnummer wordt bij de aanmelding van de GD DAP Afhaalservice verstrekt. De aangemelde monsters worden 's avonds dan wel 's nachts opgehaald bij de DAPs en voor 9.00 uur de volgende dag afgeleverd bij het CIDC.

